

# KØRESYGE OG SØSYGE

KVALMEBEHANDLING

KLINISK TESTET



SEA  BAND<sup>®</sup>  
- *det naturlige valg*

AKTIVÉR KROPPENS EGET FORSVAR

# KØRESYGE OG SØSYGE

Transportsyge opstår, når der er ubalance mellem det øjet ser, og de oplysninger hjernen modtager. Det kan fremkalde kvalme og opkast. Sea-Band genopretter kroppens naturlige balance, og kvalmen forsvinder helt eller reduceres.



## Sådan virker Sea-Band

Akupressurbåndet virker ved at give et svagt vedvarende tryk på akupressurpunkter under håndleddene. Samme princip som akupunktur - bare uden nåle.

## Klinisk testet

Sea-Band er klinisk testet og har dokumenteret effekt. Resultater viser, at ni ud af ti opnår den fulde virkning.

## Kroppens eget forsvar

Sea-Band aktiverer kroppens eget forsvar mod transportsyge og kvalme.

## Virker hurtigt

Når Sea-Band er placeret korrekt forsvinder kvalmen eller bliver reduceret i løbet af få minutter.

## Voksenbånd

Sea-Band voksenbånd er universelt og kan anvendes af både voksne og børn.

## Børnebånd

Sea-Band børnebånd giver lidt mere tryk på små håndled og anvendes til børn i alderen 3 til 12 år. Yngre børn kan dog også opnå virkning med Sea-Band.


AKTIVÉR KROPPENS EGET FORSVAR

### **Placér Sea-Band korrekt**

Det er vigtigt, at Sea-Band placeres korrekt, så akupressurknappen trykker på P6-punktet.

Læg dine tre midterste fingre på undersiden af håndleddet som tegningen viser (personens egne fingre). Punktet ligger lige under pegefingeren mellem de to sener. Placér knappen, så den trykker på P6-punktet.

Gentag fremgangsmåden på det andet håndled.

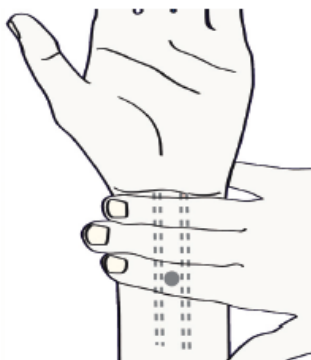

### **Du kan øge virkningen**

Kvalme kommer typisk i bølger. Du kan øge virkningen ved at trykke eller massere let på akupressurknappen i nogle sekunder.

### **Hvornår tager jeg det på**

Sea-Band tages på forebyggende inden kvalmen opstår. Er kvalmen opstået vil virkningen begynde efter få minutter.

### **Anvendes efter behov**

Du fornemmer selv, hvor længe det er nødvendigt at bære dit Sea-Band. Du kan gå med det hele tiden. Tag dog straks båndet af, hvis hånden hæver.

### **Bliv tilfreds med dit Sea-Band**

Du kan, uanset årsag, altid returnere dit Sea-Band og få hele beløbet refunderet. Send det til nedenstående adresse sammen med kvittering og dit telefonnummer.

## **GRAVIDITETSKVALME**

Mange kvinder fravælger at indtage medikamenter mod kvalme under graviditeten.

Med Sea-Band kan du nu forebygge og kontrollere graviditetskvalmen, helt uden medikamenter og bekymring. Behandlingen aktiverer blot kroppens eget forsvar mod kvalme, og er en naturlig og effektiv hjælp for de fleste.



Sea-Band anvendes generelt mod kvalme f.eks. som følge af bedøvelse, medicin eller kemoterapi

Sea-Band fås på apoteket, hos Matas og i Helsebutikker.

Læs mere om Sea-Band på [www.seaband.dk](http://www.seaband.dk)

# GRAVIDITETSKVALME

KVALMEBEHANDLING

KLINISK TESTET 

Førstehjælp mod  
morgenkvalme



SEA  BAND<sup>®</sup>  
- det naturlige valg

AKTIVÉR KROPPENS EGET FORSVAR